

產品保固卡

銷售日期： 年 月 日

銷售人員簽章

經銷商店章

SINCE 1981
Nova 光星



前臂拐杖

使用說明書/保固卡

“NOVA”醫療用拐杖(未滅菌)

衛部醫器製壹登字第000256號

前言

● 序言：

感謝您選擇使用本產品，建議您在首次操作產品前，請完整詳閱說明書，瞭解正確的使用知識與基本的保養維護，讓您擁有更完善的照護與行動力。
若有任何操作上的問題或其他的服務需求，請洽購買的專業經銷商諮詢。


● 設計理念：

為輔助患者行走及保持身體平衡，並減輕受傷肢體負重，以增加患者之自我照顧與活動能力。前臂拐杖主體材質使用鋁合金減輕整體重量，高度皆可隨身高調整。適用於身體狀況良好，手腕及手臂有力之使用者，常用於需長期使用輔具行走者，如小兒麻痺患者。

注意事項

- 使用者需有良好的上肢操控能力，並依據下肢狀態可分為單側或雙側之使用方式。
- 使用前請務必確認拐杖之使用方向是否正確，以確保行走安全。
- 請穿著合腳防滑的鞋子，若更換鞋子有落差時，請務必微調高度後再使用，以達最佳使用效果避免造成傷害。
- 上下樓梯時，請務必先熟悉使用方式再進行，以免發生危險。
- 使用前必須檢查主體結構是否變形，螺絲是否鎖緊，腳墊有無碎裂等情形。
- 避免於地面潮濕、光線不足及有障礙物或路面崎嶇處時行走，以免滑倒或絆倒。
- 當使用者初次使用或身體狀況不佳時，建議有陪同人員協助，避免獨自使用以確保安全。

部位介紹

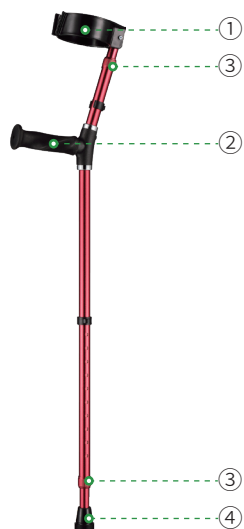

① 手臂護環

② 手握把

③ 鋁帽

④ 腳墊

技術規格

- 產品名稱：7815 旋轉工學握把型前臂拐杖
- 產品品號：B7815PD-L / B7815PD-R
- 握把材質：TPR
- 主體材質：鋁合金
- 主體管徑：七分 (22.2mm)
- 主體顏色：● 霧紅色
- 握把高度：75-100 cm
- 適用身高：150-190 cm
- 產品重量：0.75 kg/支
- 最大荷重：120 kg

日常保養

1、基礎清潔

- 清潔產品時，請勿使用含任何化學物品之清潔劑，用乾布擦拭即可。

2、日常檢驗

- 檢查骨架結構是否有彎曲變形而產生高低落差。
- 檢查是否有任何零件鬆動或損壞。
- 使用過程中是否流暢且無任何異音出現。
- 當手臂護環、握把、腳墊...等耗材磨損嚴重時，請至經銷商檢查並更換新配件，以確保使用者安全。

保固說明

1、保固範圍


- 本產品於正常使用及維護下，主體管件為兩年保固。
- 若遺失有經銷商蓋印之保固卡時，將依產品標籤上的出廠日期認定保固期限。

2、非保固範圍

- 耗材配件不列入保固範圍，如：手臂護環、握把、腳墊...等。
- 因天災、不可抗拒外力或者人為疏忽不慎造成任何之損傷者。
- 自行拆裝、任意變換部品規格零件亦或使用非本公司提供之原廠配件所引起之故障損傷者。
- 無法辨識本公司之產品標籤且遺失保固卡者。
- 經本公司專業人員判斷後認定為非保固範圍之狀況者。


如何調整前臂拐杖高度

- 旋開連接外管與內管的鋁帽。
- 按下銅珠，同時將內管稍微旋轉即可上下調整長度。
- 確定位置後，務必使銅珠彈出調整孔以維持調整後的拐杖長度。
- 旋緊連接外管與內管的鋁帽。

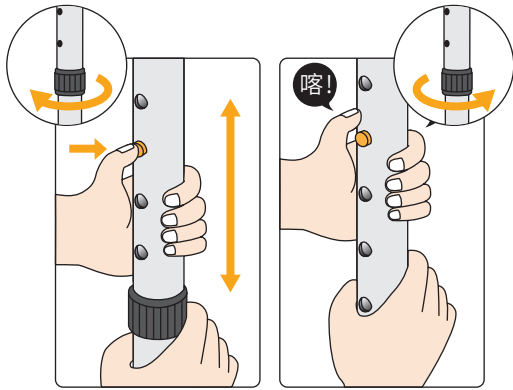


如何調整適合自己的高度

- 穿著日常行走的鞋子。
- 將拐杖放置於距離腳掌外側斜前方約 15 公分，手臂護環距離肘關節下約 2~3 指寬。
- 當手持握把時，握把請調整至手肘彎曲約 20 度的高度。

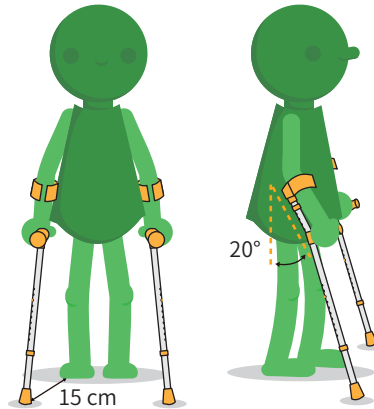


如何調整手握把角度

- 使用 M5 六角扳手旋開用來固定手握把的長螺絲。
- 將手握把套由內而外抽出。
- 調整至適合手握的角度後再將手握把裝上。
- 重新鎖附即完成動作。

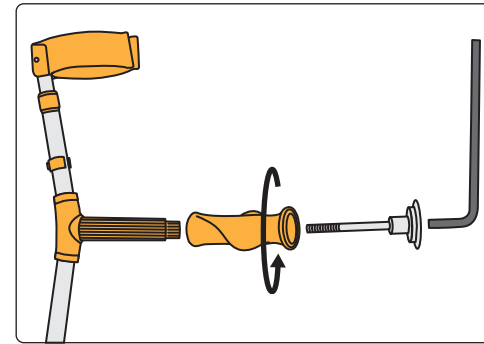


擺盪步態

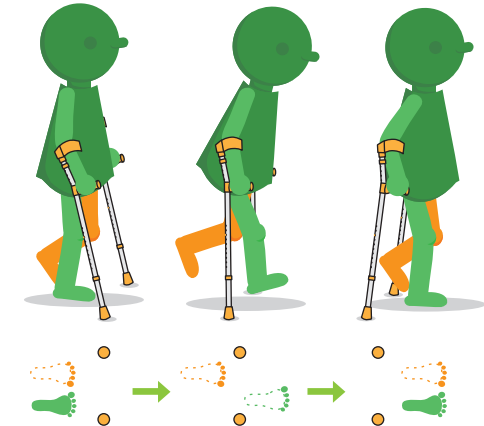


- Step 1 雙側拐杖向前支撐。
- Step 2 透過手握把支撐將身體重心向前，並將健側腳向前擺盪。
- Step 3 向前擺盪過後，健側腳緩慢著地。

三點步態

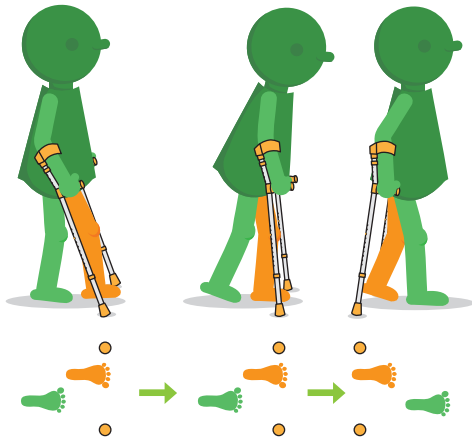


- Step 1 雙側拐杖和患側同時向前跨出。
- Step 2 透過手握把支撐將身體重心向前。
- Step 3 將健側腳向前跨越並緩慢著地。

兩點步態 (單邊使用)

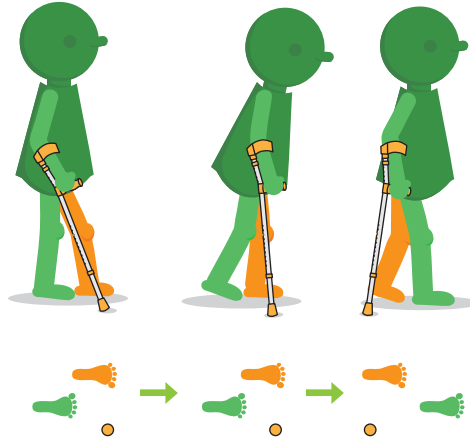

- Step 1 使用單支前臂拐杖支撐於健側，拐杖與患側同時跨出。
- Step 2 透過手握把支撐將身體重心向前。
- Step 3 將健側腳向前跨越並緩慢著地。

如何上下樓梯

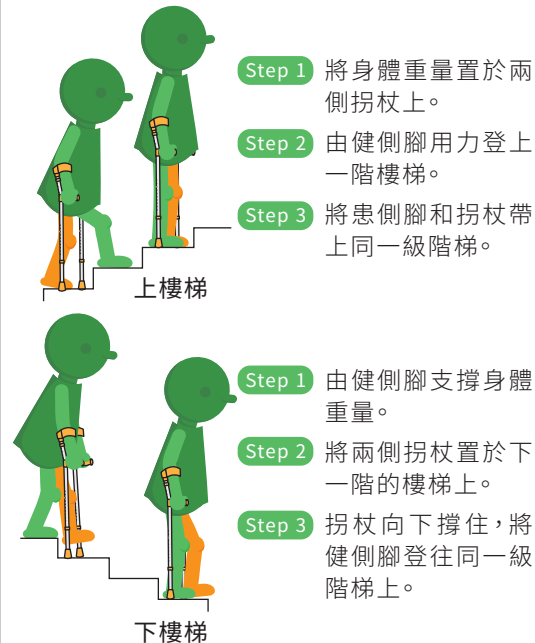

光星骨科復健器材股份有限公司
NOVA ORTHOPEDIC & REHABILITATION APPLIANCE, INC.

Web : www.novaortho.com.tw
E-mail : service@novaortho.com.tw
Customer Service : 0800-036-678
Tel : 04-25626762 / Fax : 04-25626546
Add : 台中市神岡區豐洲路 1096 號