

特徴

クミアイエコーコップは、半透明プラスチック絆創膏の中央に殺菌剤を含ませたパッドを貼着した救急絆創膏です。貼ったまま水仕事もでき、小さな傷の手当てに大変便利です。

△ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆

用法・用量

被覆してある両側の保護用被覆物をはずし、中央のパッドに触れないようにして、パッドが傷口を保護するように貼り付けます。

〈用法・用量に関する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用してください。
- 粘着面を患部に貼らないでください。

成分・分量 パッド10g(1,250cm²)中

ベンザルコニウム塩化物……………10mg含有
絆創膏部に添加物として、生ゴム、ステレンブタジエンゴム、テルペン樹脂、ポリブテン、BHTを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

クミアイ家庭薬相談窓口
☎0238(46)2013
月～金曜日 9:00～17:00(税日を除く)

製造販売者 協同薬品工業株式会社
山形県東置賜郡川西町大字西大塚930

押してあげる



副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

DR-A032A
1

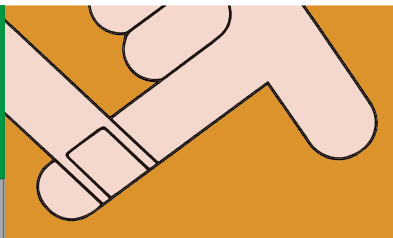
第3類医薬品

クミアイ
エコーコップ28枚
普通サイズ(19mm×72mm)

販売者 全国農業協同組合連合会

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆

きりきず・すりきず

無色殺菌剤配合
救急絆創膏

クミアイ エコーコップ

第3類医薬品



第3類医薬品

クミアイ エコーコップ

使用期限
救急ばんそうこう

12C